


Cide Test 1^{MC}

De 1,0 % à 2,5 % de glutaraldéhyde

Une garantie que vos produits sont sûrs et efficaces


- Les bandelettes de vérification sont nécessaires pour évaluer la concentration de glutaraldéhyde dans les solutions de stérilisation et de désinfection de haut niveau. **Vérifiez le pourcentage de glutaraldéhyde dans la solution** à l'aide de bandelettes réactives.
- Cet outil de contrôle de la qualité **vérifie l'efficacité de la solution Gluterate (2,0 % de glutaraldéhyde) de Germiphene lors du retraitement** de l'équipement et des instruments médicaux.
- Les désinfectants et stérilisants de haut niveau **doivent maintenir une concentration minimale efficace (CME) égale ou supérieure à 1,5 % de glutaraldéhyde** pendant la durée de vie utile de 30 jours pour assurer une stérilisation et une désinfection de haut niveau efficaces.

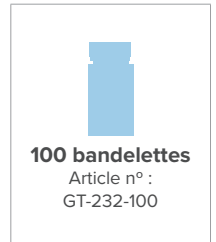

	Vous devez tester la solution en fonction de son utilisation. Par exemple, si vous utilisez la solution quotidiennement, elle doit être testée tous les jours et les résultats doivent être consignés dans un registre de désinfection et de stérilisation de haut niveau.
Facile et rapide à utiliser	Plonger la bandelette dans la solution d'essai pendant une seconde ou appliquer une goutte de solution d'essai sur le tampon réactif. Éliminer l'excès de solution d'essai en secouant doucement la bandelette ou en appuyant le côté de la bandelette sur du papier absorbant. Après 30 secondes, comparer la couleur de la bandelette aux témoins de couleur.

DES RÉSULTATS CLAIRS ET RAPIDES

Concentration de glutaraldéhyde

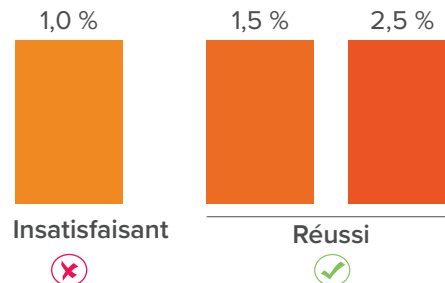

Essayez ces produits complémentaires

GLUTE NEUT

Neutralisant pour le glutaraldéhyde

Une solution écologique à une étape pour éliminer de manière sécuritaire le glutaraldéhyde.

Format : 16 sachets de 50 g par boîte
Article n° : GLUTE-NEUT



GLUTERATE

Solution de stérilisation et de désinfection

Élimination des agents responsables de la tuberculose en dix minutes et désinfection de haut niveau en dix minutes

Taille : bouteille de 4 L
Article n° : GLUT



Pour commander Cide Test ou pour obtenir plus de renseignements, contactez votre gestionnaire de compte ou Germiphene au 1 800 265-9931 | info@germiphene.com | www.germiphene.com

Rév. 01 072024

GERMIPHENE

Une division de Young Innovations