

GLUTE NEUT




Neutralise en seulement
5 minutes!

16 sachets de 50 g Article n° : GLUTE-NEUT

Solution à 2 % de glutaraldéhyde

- Écologique
- Une solution en une étape pour éliminer le glutaraldéhyde et l'OPA
- Transforme les produits chimiques dangereux pour l'environnement en déchets non toxiques et non dangereux
- Indique la désactivation en changeant de couleur

Efficace	Un composé organique breveté qui neutralise la solution avant de l'éliminer .		
	Un sachet neutralise 1 L de solution de 2 % à 2,5 % de glutaraldéhyde ou 4 L de solution de 0,55 % d'OPA .		
	Gluterate peut être réutilisé jusqu'à 30 jours.		
	Gluterate contient un agent de surface hautement efficace qui assure un mouillage complet. Il est également extrêmement efficace avec les savons et le sol organique .		
Facile	Prêt à utiliser. Vous n'avez qu'à verser le contenu du sachet GLUTE NEUT dans la solution. Aucun mélange nécessaire et aucun gaspillage.		
	GLUTE NEUT fait passer les solutions de glutaraldéhyde ou d'OPA du jaune au rouge lorsqu'elles sont neutralisées.		
Sécuritaire	Le processus naturel d'oxydation neutralise les solutions et permet une élimination facile. GLUTE NEUT n'affecte pas les organismes utilisés dans les usines de traitement des eaux usées et n'est pas dangereux pour les réseaux hydrographiques et la vie aquatique.		
	GLUTE NEUT élimine les vapeurs causées par l'agitation des solutions pendant leur élimination. L'utilisation de GLUTE NEUT prévient l'irritation des yeux et de la peau causée par les éclaboussures et les renversements lors de l'élimination de la solution.		
GLUTE NEUT		PRODUITS DES CONCURRENTS	
Emballage empilable, espace de stockage minimal		Bouteille de 960 ml (32 oz)	
Une boîte (16 sachets de 50 g) neutralise 16 L de glutaraldéhyde ou 64 L d'OPA.		Une bouteille (960 ml) neutralise 7,5 L de glutaraldéhyde ou 60,5 L d'OPA.	
Poudre		Liquide	
Risque minime de renversements, d'éclaboussures et de dégâts		Risque accru de renversements, d'éclaboussures et de dégâts, comparativement aux produits à base de poudre	
Rien à mesurer et aucun gaspillage		Les liquides doivent être mesurés avec précision	

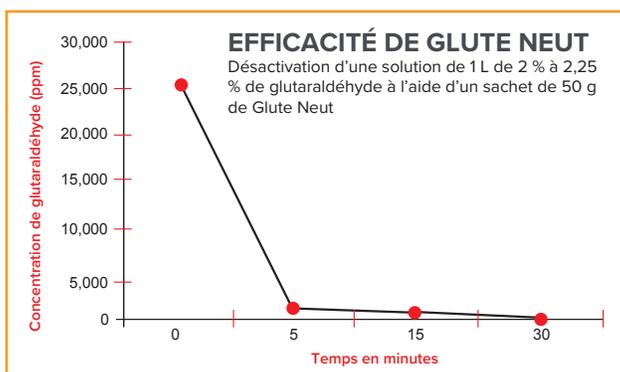

Essayez ce produit d'accompagnement utile

GLUTERATE

Solution de stérilisation et de désinfection
Élimination des agents responsables de la tuberculose en dix minutes et désinfection de haut niveau en dix minutes

Taille : bouteille de 4 L | Article n° : GLUT

Pour commander **GLUTE NEUT** ou pour obtenir plus de renseignements, contactez votre gestionnaire de compte ou Germiphene au 1 800 265-9931 | info@germiphene.com | www.germiphene.com

Rév. 01 072024