

# YOUNG® PerioDT®

avec Technologie de Dessiccation

## Processus d'application

ÉTAPE  
01

### ISOLER ET SÉCHER

Après avoir déterminé si le traitement PerioDT convient au patient, isoler la surface où PerioDT sera appliqué. Sécher la surface à l'air ou à l'aide d'une compresse.



ÉTAPE  
02

### APPLIQUER

Appliquer PerioDT sous-gingivalement jusqu'à ce que le produit s'écoule de la poche en laissant une fine couche supra-gingival. Ne pas appliquer excessivement le produit. Laisser le produit sur la surface entre 10 et 30 secondes maximum.



ÉTAPE  
03

### ASPIRER ET RINCER

Utiliser un embout d'aspiration haut volume pour aspirer tout produit restant sur la surface. Ensuite, rincez bien la bouche avec de l'eau. Ne pas laisser de produit résiduel dans la bouche du patient.



ÉTAPE  
04

### INSTRUMENTATION

Effectuer un détartrage et surfaçage radiculaire.



ÉTAPE  
05

### DEUXIÈME APPLICATION

Enfin, répéter les étapes 1 à 3 de l'application de PerioDT pour détruire tout biofilm restant.



**REMARQUE :** Lors de l'utilisation de PerioDT pour le traitement des lésions parodontales ou un débridement important, il est recommandé de retirer et de rincer soigneusement l'ensemble du PerioDT avant le détartrage. Ensuite, si nécessaire, appliquer à nouveau sur les poches parodontales et suivre les instructions d'utilisation. Il n'est pas nécessaire ni recommandé d'effectuer d'autres traitements d'appoint après l'application de PerioDT. L'ajout d'autres médicaments dans les poches parodontales peut augmenter le risque d'irritation ou d'inflammation après le traitement. La patientèle peut reprendre les soins normaux à domicile sans restriction alimentaire immédiatement après le traitement.

## Indication et flux de travail pour le traitement des lésions parodontales

Déterminer si le traitement PerioDT convient au patient ou à la patiente



Isoler et sécher la surface



Commencer par appliquer PerioDT sous-gingivalement (si nécessaire), puis supra-gingivalement



Aspirer et rincer



Effectuer le détartrage et le curetage du ciment radiculaire



Répéter les étapes ci-dessus pour appliquer le produit après le détartrage et le curetage du ciment radiculaire

Consultez les instructions pour obtenir d'autres conseils sur l'application et des consignes de sécurité à l'adresse [bit.ly/periodt-ifu](https://bit.ly/periodt-ifu).